

# TERMÓMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO



Marca:	Hospital&Homecare
Fabricante:	Hospital&Homecare Medical Device Co.
Procedencia:	RDC
Presentación:	Unidad

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Uso:** Medición de temperatura corporal.
- Descripción:** El termómetro infrarrojo de frente, es un dispositivo que permite medir la temperatura corporal a través de la detección de la intensidad de la luz infrarroja emitida por la frente. El calor es convertido en temperatura que se visualiza en la pantalla del termómetro.
- Componentes:** 01 Termómetro Infrarrojo de frente
- Especificaciones:**
  - Reloj en tiempo real que ayuda a reconocer cada medición de temperatura
  - Modo para medición sobre la frente y objetos o superficies. Medición en 1 segundo.
  - Sonido de alarma si temperatura es mayor a 37.8°C
  - Permite almacenar 10 memorias (tanto de frente como de superficie). Los datos almacenados son: fecha/hora y modo
  - Posibilidad de seleccionar medición en °C y °F. Rango medición = 34°C-43°C
  - **La medición se realiza en el centro de la frente, con una distancia de 1-2 cm**
  - Precisión en laboratorio= +0.2 °C en rango de 35°C y 42°C
  - Dimensiones= 153x 41x 44mm
- Ventajas de uso:**
  - Equipo calibrado en fábrica
  - El usuario debe estar en un recinto cerrado 30 min previo a la medición
  - El usuario no debe haber realizado ejercicio, comido o estar recién bañado 30 min previo a la medición
  - Retire cremas, maquillaje, sudor y cabello para que no interfieran con la medición
  - No haga la medición sobre heridas o cicatrices
  - No use este termómetro al aire libre
  - Si el termómetro está almacenado en un lugar de temperatura muy diferente a la que va medir, testee el termómetro 30 min previo a su uso.
  - Incluye 2 pilas AAA
- Precauciones**
  - Se sugiere para uso domiciliario
  - No reemplaza la consulta a un profesional de la salud
  - Los niños deben tomarse la temperatura bajo supervisión. Contiene piezas pequeñas.
  - No sumergir. Limpieza con paño humedecido en alcohol isopropílico al 75%
  - Garantía de 1 año. No modificar el equipo sin autorización del fabricante
  - No exponer el equipo a temperaturas extremas o a excesiva humedad (-25-55°C)
  - Baterías reemplazables (alcalinas AAA)
- Código:**

Código	Descripción
EQMTER052	TERMOMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO HH